


Curafix® i. v. Control **NEU**

Einfache Kontrolle ohne Verbandwechsel.

Lochstanzung
für
Injektionsport

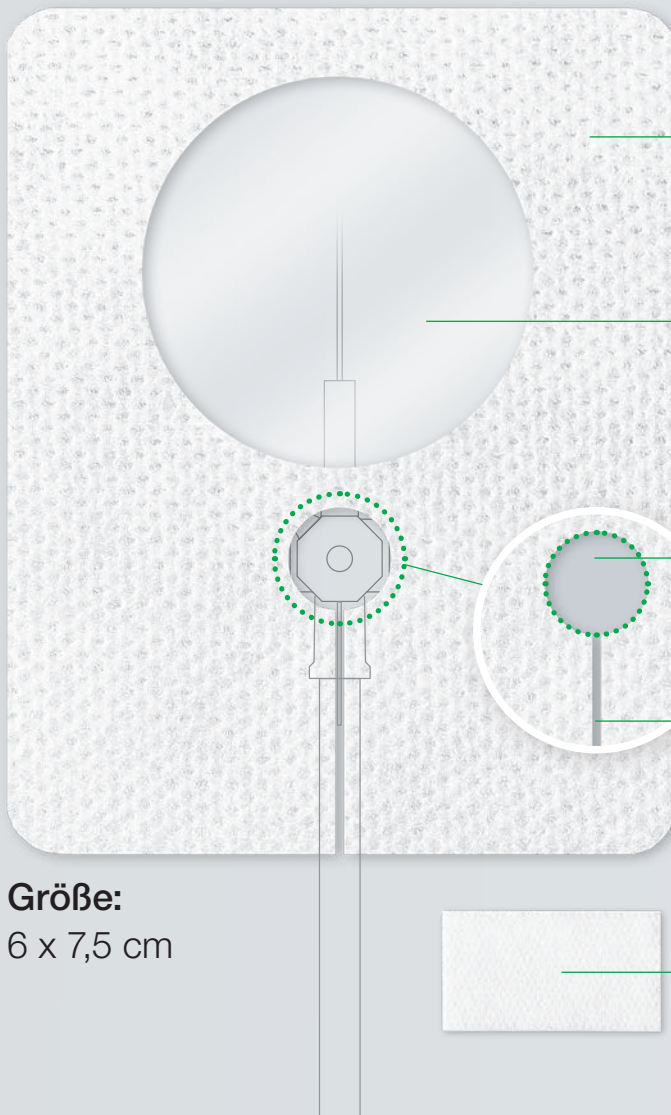

Größe:
6 x 7,5 cm

Atmungsaktiver Konturrahmen

- zuverlässiger Schutz der Punktionsstelle vor Kontamination*

Transparentes Sichtfenster

- Beobachtung und Kontrolle der Punktionsstelle ohne Verbandwechsel

Lochstanzung

- ermöglicht eine leichte Positionierung um eine Kanüle mit Injektionsport

Mittige Schlitzung

- Überlappung der Pflasterflügel für eine sichere Fixierung von Kanülen*

Steriles Polsterkissen

- zur Unterpolsterung der Kanüle



Verwendung:
für PVK

Geeignet für:
Flügelkanülen mit Injektionsport

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Eigenschaften:



transparentes Sichtfenster



atmungsaktive Folie



wasserundurchlässig



rückstandsarme Entfernung
des Pflasters*

Nutzen:

längere Verbandwechselintervalle durch Kontrolle
der Punktionsstelle¹

keim- und bakteriendicht

zum Duschen geeignet*

hautfreundlich**

Applikation:



Schritt 1:
Zur Polsterung das beige-
legte Polsterkissen unter
der Kanüle positionieren.



Schritt 2:
Großes Abdeckpapier
auf der Rückseite lösen.



Schritt 3:
Pflaster mit rundem
Einschnitt um Injektions-
port und Sichtfenster auf
Punktionsstelle legen.



Schritt 4:
Kleine Abdeckpapiere
von den Flügeln lösen
und diese überlappend
anbringen.



Schritt 5:
Pflaster ganzflächig glatt
streichen und andrücken.

Zum Anschauen des Anwendungsvideos den QR-Code scannen.
Oder Sie besuchen uns unter www.Lohmann-Rauscher.com.



* Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

** Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.