


Curafix® i.v. Control **NOUVEAU**

Contrôle facile sans changement de pansement.

Découpe avec trou pour port d'injection

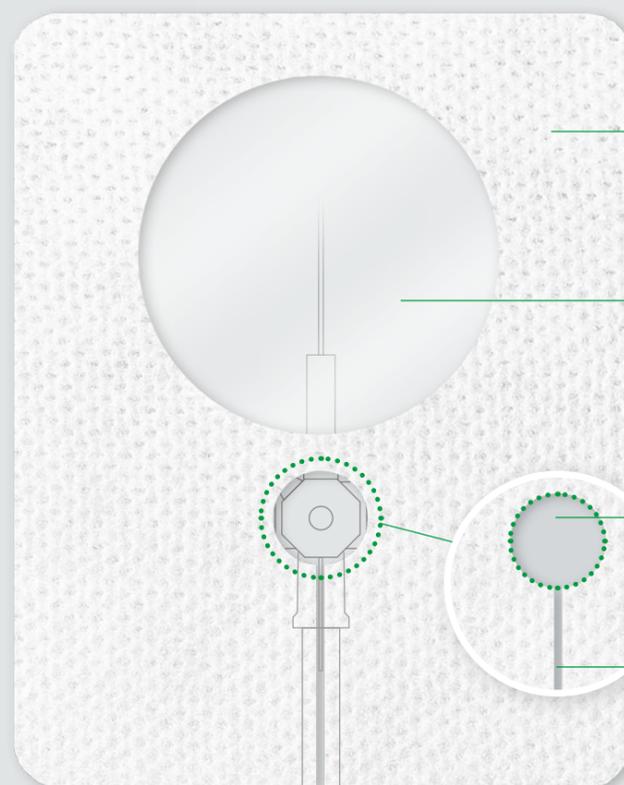

Cadre de contour respirant
■ protection fiable du site de ponction contre la contamination*

Fenêtre de contrôle transparente
■ observation et contrôle du site de ponction sans changement de pansement

Découpe avec trou
■ permet un positionnement facile autour de la canule avec port d'injection

Fente centrale
■ chevauchement des ailes du pansement pour une fixation sûre des canules*

Coussinet stérile
■ pour sous-rembourrage de la canule

Taille :
6 x 7,5 cm



Utilisation :
pour CVP

Adapté à :
canules ailées avec port d'injection

Curafix® i.v. Control **NOUVEAU**

Vos avantages en un coup d'œil :

Propriétés :



fenêtre de contrôle transparente



film respirant



imperméable à l'eau



retrait faible en résidus du pansement*

Avantages :

intervalles plus longs entre les changements de pansement via le contrôle du site de ponction¹

étanche aux germes et aux bactéries

adapté à la douche*

doux pour la peau**

Application :



1ère étape :
Pour le rembourrage, positionner le coussinet fourni sous la canule.




2ème étape :
Détacher le grand papier de protection sur l'arrière.



3ème étape :
Poser le pansement avec l'entaille ronde autour du port d'injection et la fenêtre transparente sur le site de ponction.



4ème étape :
Enlever les petits papiers de protections des ailes et les poser de façon à ce qu'elles se chevauchent.

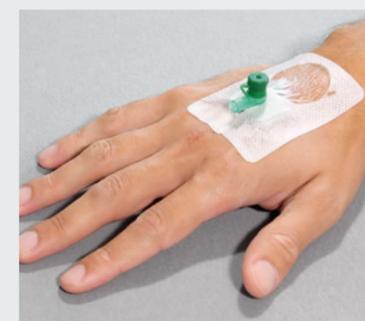

5ème étape :
Lisser le pansement sur toute la surface et presser.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo d'utilisation.
Vous pouvez également consulter nous sur www.Lohmann-Rauscher.com.

