


Curafix® i.v. Soft **NOUVEAU**

Forme comprimée, facile à positionner.

Découpe avec trou pour port d'injection

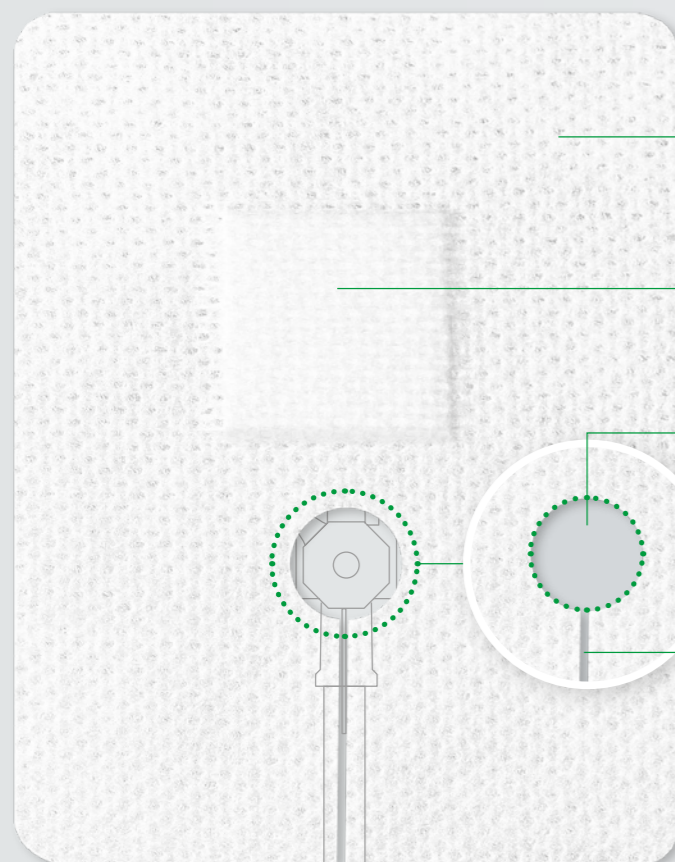

Non-tissé respirant

- bonne perméabilité à la vapeur d'eau

Compresse

- absorption du sang et de l'exsudat*

Découpe avec trou

- permet un positionnement facile autour d'une canule avec port d'injection

Fente centrale

- chevauchement des ailes du pansement pour une fixation sûre des canules*

Coussinet stérile

- pour sous-rembourrage de la canule

Taille :
6 x 7,5 cm



Utilisation :
pour CVP

Adapté à :
canules ailées avec port d'injection

Curafix® i.v. Soft **NOUVEAU**

Vos avantages en un coup d'œil :

Propriétés :



bord arrondis



non-tissé extensible



souple



formule sans latex

Avantages :

adhérence parfaite et fiable sur la peau*

enfermement de la canule par un adhésif de chevauchement des ailes du pansement

s'adapte aux contours du corps

doux pour la peau**

Application :



1ère étape :

Pour le rembourrage, positionner le coussinet fourni sous la canule.



2ème étape :

Détacher le grand papier de protection sur l'arrière.



3ème étape :

Poser le pansement avec l'entaille ronde autour du port d'injection et recouvrir le site de ponction avec des compresse.



4ème étape :

Enlever les petits papiers de protections des ailes et les poser de façon à ce qu'elles se chevauchent.



5ème étape :

Lisser le pansement sur toute la surface et presser.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo d'utilisation.
Vous pouvez également consulter nous sur www.Lohmann-Rauscher.com.

