


Curafix® i. v. Junior **NOUVEAU**

Un design ours pour les plus jeunes patients.

Le produit le plus petit sur le marché en termes de surface

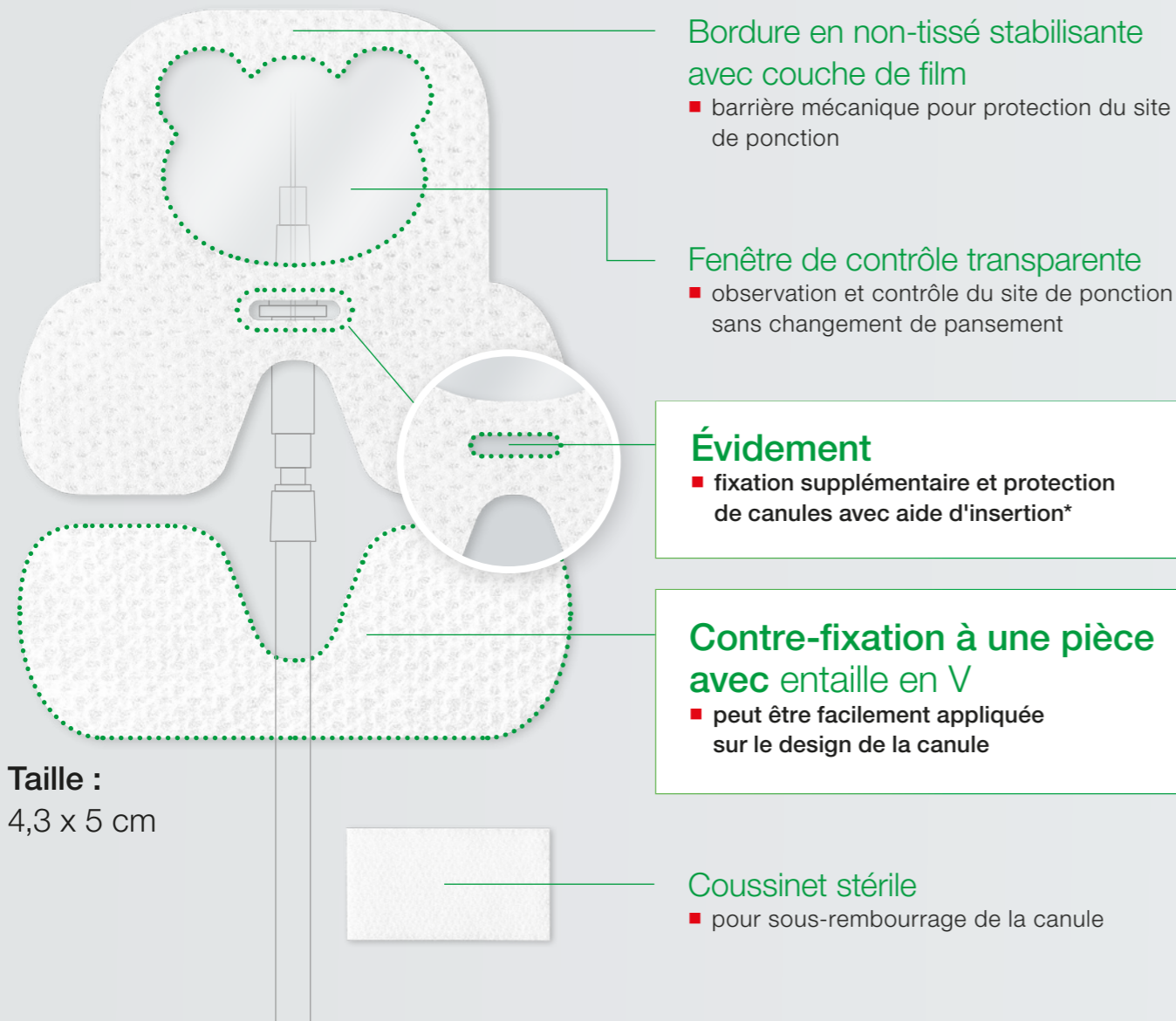

Taille :
4,3 x 5 cm

Utilisation :
pour CVP

Adapté à :
tous les types de canule classiques

Curafix® i. v. Junior **NOUVEAU**

Vos avantages en un coup d'œil :

Propriétés :

contre-fixation

évidement

formule sans latex

imperméable à l'eau

Avantages :

adaptation individuelle à la canule possible

soulagement de la force de traction supplémentaire

doux pour la peau*

lavable avec des désinfectants**

Application :



1ère étape :
Pour le rembourrage, positionner le coussinet fourni sous la canule.



2ème étape :
Retirer le grand papier de protection sur lequel est fixée la contre-fixation.



3ème étape :
Poser le pansement avec l'entaille en V autour de la canule; **Astuce:** Les canules avec aide pour l'insertion peuvent être fixées en supplément par l'évidement.



4ème étape :
Retirer le papier de protection et presser le pansement.



5ème étape :
Poser la contre-fixation autour de la canule et retirer la languette de préhension.



6ème étape :
Lisser sur toute la surface le pansement avec contre-fixation et presser.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo d'utilisation.
Vous pouvez également consulter nous sur www.Lohmann-Rauscher.com.

