

Curafix® i.v. Control **NOUVEAU**

La solution intelligente de forme et de taille.

Avec contre-fixation innovante

Bordure en non-tissé stabilisante avec couche de film
■ protection fiable du site de ponction contre la contamination*

Fenêtre de contrôle transparente avec support adhésif poreux
■ permet le contrôle du site de ponction
■ minimise le risque d'accumulation d'humidité sous le pansement*

Évidement
■ fixation supplémentaire et protection de canules avec aide d'insertion*

Contre-fixation à une pièce avec entaille en V
■ peut être facilement adaptée au design de la canule

Taille :
5,5 x 6,5 cm

Coussinet stérile
■ pour sous-rembourrage de la canule

Utilisation :
pour CVP

Adapté à :
tous les types de canule classiques

Curafix® i.v. Control **NOUVEAU**

Vos avantages en un coup d'œil :

Propriétés :

 fenêtre de contrôle transparente

 perméabilité à la vapeur d'eau élevée

 contre-fixation

 forme ergonomique

Avantages :

intervalles plus longs entre les changements de pansement via le contrôle du site de ponction¹

risque de macération faible*

fixation sûre de la canule*

adhérence fiable sur la peau*

Application:



1ère étape :
Pour le rembourrage, positionner le coussinet fourni sous la canule.



2ème étape :
Retirer le grand papier de protection sur lequel est fixée la contre-fixation.



3ème étape :
Poser le pansement avec l'entaille en V autour de la canule; **Astuce :** Les canules avec aide pour l'insertion peuvent être fixées en supplément par l'évidement.



4ème étape :
Retirer le papier de protection et presser le pansement.



5ème étape :
Poser la contre-fixation autour de la canule et retirer la languette de préhension.



6ème étape :
Lisser sur toute la surface le pansement avec contre-fixation et presser.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo d'utilisation.
Vous pouvez également consulter nous sur www.Lohmann-Rauscher.com.

