

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### DOC'S PROPLUG ®

#### PLASTISCHE OHRSCHUTZSTÖPSEL

Diese Ohrstöpsel können vor *Badeotitis* und anderen Erkrankungen des Ohrs schützen, die bei häufigem Wasserkontakt auftreten. Bei *Trommelfellriss* oder *eingesetzten Paukenröhrchen* sollten Sie vor der Verwendung allerdings einen Arzt um Rat fragen.

**WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSE:** Wählen Sie aus dem PROPLUG-Set am besten einen etwas grösseren Ohrstöpsel, der genau zwischen Gegenleiste (Anthelix) und Ohrknorpel (Tragus) passt. Der PROPLUG nimmt automatisch immer wieder seine Originalgrösse an und bietet somit eine optimale Abdeckung der Ohrmuschel und schützt mit dem rechteckigen Stöpselkopf den Gehörgang.

**EINSETZEN DES PROPLUG:** Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das Einsetzen des rechten Ohrstöpsels.

Abb. 1



Abb.2



1. Nehmen Sie den PROPLUG am äusseren Rand zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand.
2. Greifen Sie mit der linken Hand hinter dem Kopf zum rechten Ohr, nehmen Sie die Haare beiseite und spreizen Sie die Ohrmuschel leicht auseinander, damit der PROPLUG besser eingesetzt werden kann.
3. Setzen Sie den PROPLUG so in die Ohrmuschel, dass der pfeilartige Teil nach oben zur Helixwurzel zeigt. Erzeugen Sie mit der linken Hand Gegenzug, während Sie den PROPLUG mit dem rechten Zeigefinger einpassen. Setzen Sie den PROPLUG beim ersten Mal vor einem Spiegel ein. Siehe Abbildung 1 und 2.
4. Die PROPLUGS können zwar nicht sinken, sollten beim Schwimmen zur Sicherheit jedoch an einer um den Hals gelegten Schnur befestigt werden.

#### HERAUSNEHMEN DES OHRSTÖPSELS:

1. Ziehen Sie den PROPLUG langsam mit Zeigefinger und Daumen an der Lasche aus dem Ohr.
2. Reinigen Sie den PROPLUG mit Watte und Alkohol. Bewahren Sie ihn an einem kühlen, sonnengeschützten Ort auf.
3. **Achtung:** Benutzen Sie den PROPLUG nicht beim Tauchen mit Atemschutzgerät, wenn Ihr Trommelfell intakt ist. Sollten Beschwerden auftreten, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

12/2001

**novimed**  
Medizintechnik

Novimed AG Medizintechnik Heimstrasse 46 CH-8953 Dietikon  
Telefon +41 (0)44 743 40 60 Telefax +41 (0)44 743 40 65  
info@novimed.ch www.novimed.ch