

ERLEBEN SIE DEN **OXY** EFFEKT

Incidin® OxyFoam & OxyWipe

NEU!


Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H_2O_2 ™

Die innovativen Produkte Incidin® OxyFoam & Incidin OxyWipe bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum.

Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände.

Incidin® OxyFoam & OxyWipe bieten:

- ▲ Hi-speed H_2O_2 ™
- ▲ Praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- ▲ Keine Gefahrensymbole (gem. CLP) – keine Persönliche Schutzausrüstung! erforderlich
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit

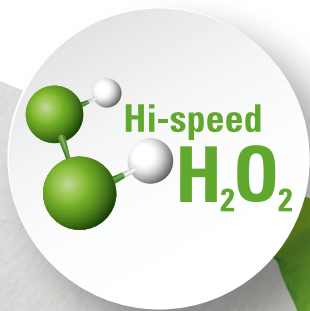

Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂™

15
SEK²Bakterizid
(EN 13727 / 16615)15
SEK²Viruzid gegen
behüllte Viren15
MIN²

Noroviruzid

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
EFFEKTIV	Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
SICHER	Keine Gefahrensymbole (gem. CLP) – Keine PSA ¹ erforderlich
ANWENDERFREUNDLICH	Exzellente Materialverträglichkeit – Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt

WIRKSAMKEIT	Einwirkzeit OXYFOAM	Einwirkzeit OXYWIPE
Flächendesinfektion gem. dem VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	5 Min.	15 Min.
Fungizid	15 Min.	15 Min.
Mykobakterizid	15 Min.	60 Min.
Geprüft gem. RKI-Bedingung 01/2004* (hohe Belastung)		
Wirksam gegen umhüllte Viren gem. RKI-Empfehlung 01/2004*	15 Sek.	30 Sek.
Rotavirus*	30 Sek.	30 Sek.
Adenovirus*	1 Min.	15 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	30 Sek.	30 Sek.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	15 Sek.	1 Min.
EN 13624 (levurozid)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fungizid) ¹	5 Min.	15 Min.
EN 14348 (tuberkuluzid, mykobakterizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (Adenovirus)	30 Sek.	1 Min.
EN 14476 (Norovirus) ¹	15 Min.	60 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	15 Sek.	5 Min.
EN 16615 (levurozid)	15 Sek.	1 Min.
EN 16615 (fungizid)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberkuluzid, mykobakterizid)	15 Min.	60 Min.

*DVG 2008

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR INCIDIN® OXYFOAM



- 1 Aus einem Abstand von ca. 30 cm auf die Oberfläche sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen



- 1 Auf einen sauberen Tuch sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2000
www.ecolab.eu



REGIONAL OFFICE

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu



ANWENDUNGSBEREICH

Incidin® OxyFoam:

Schaumspray zur Reinigung und Desinfektion medizinischer Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und medizinischem Inventar.



Incidin® OxyWipe:

Reinigungs- und Desinfektionstücher für medizinische Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und Inventar.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Incidin® OxyFoam: Anwendungsfertige Lösung. Unverdünn auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünnt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.

Incidin® OxyWipe: Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschliessen. Nicht geeignet zur Schlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

INHALTSSTOFFE

100 g enthalten:

Incidin® OxyFoam: 1,5 g Wasserstoffperoxid

Incidin® OxyWipe: 1,0 g Wasserstoffperoxid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Incidin® OxyFoam	6 x 750 ml	30 821 60 CHZN 4088
Incidin® OxyWipe	6 x 100 Tücher	30 823 60 CHZN 4103

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Incidin® OxyFoam:

Ende des Ablaufdatums

Incidin® OxyWipe: 1 Monat

Referenzen

1. Beim Umgang mit Incidin® OxyFoam oder OxyWipe muss keine PSA getragen werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.
2. Incidin® OxyFoam (EN 13727 / EN 16615 / EN 14476)

BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE
SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH
STETS KENNZEICHNUNG UND
PRODUKTINFORMATION LESEN.