

## Une manipulation facile



## 5 conseils pour un prélèvement sanguin tout en douceur.

- 1 Assurez-vous que vos mains sont **propres et sèches**.
- 2 Piquez sur le **côté du bout du doigt** plutôt que sur la pulpe.
- 3 **Gardez la peau tendue** en appuyant l'autopiqueur fermement sur la peau.
- 4 **Sélectionnez la profondeur de piqûre** la moins profonde permettant encore d'obtenir du sang.
- 5 Changez de doigt **tous les jours** et prenez les précautions nécessaires pour assurer une **bonne circulation sanguine**.

Pour en savoir plus sur Accu-Chek FastClix, consultez [www.accu-check.ch/fastclix](http://www.accu-check.ch/fastclix).

- 1 Schmid C et al. Integrated SMBG System-Handling step & potential handling error analysis. Poster presentation at the 5th International Conference on Advanced Technologies & Therapeutics for Diabetes (ATTD); 2012 February 8 -11; Barcelona, Spain.
- 2 Müller M et al. The drum-based Accu-Chek® lancing devices Accu-Chek® Multiclix and Accu-Chek® FastClix: Global Value Dossier, Roche Diagnostics GmbH, 1st edition 2012.

**Experience what's possible.**

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CLIXMOTION et ACCU-CHEK FASTCLIX sont des marques de Roche. © 2016 Roche

[www.accu-check.ch](http://www.accu-check.ch)

Roche Diabetes Care (Suisse) SA  
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz



**ACCU-CHEK®**

## Un seul Click. Point.

Accu-Chek FastClix. Le premier autopiqueur du monde avec cartouche de sécurité hygiénique.



**ACCU-CHEK®**

## Accu Chek FastClix: simple, quasiment indolore et unique.

Le prélèvement de sang est une étape essentielle de la mesure de glycémie. Cependant, l'utilisation de certaines lancettes pour prélever une goutte de sang peut s'avérer compliquée et douloureuse, sans parler du risque de blessures possibles par piqûre d'aiguille lors de la manipulation et de l'élimination des lancettes.

Accu-Chek FastClix est le premier autopiqueur au monde avec une cartouche de 6 lancettes qui se déclenche en un seul clic. Sa technologie unique rend le prélèvement sanguin rapide, facile et quasiment indolore.

**Découvrez le prélèvement sanguin en un seul clic.**  
**Vos doigts sentiront la différence.**

## Le prélèvement sanguin en un seul clic.

**Désormais encore plus compact.**

L'utilisation convient également aux petites mains – rentre dans toutes les poches.



**1 clic.**  
Armer et déclencher en un seul clic.

**6 lancettes**  
dans une cartouche.

Pratique et hygiénique.

## Clixmotion® – mouvement de lancette guidé, lors de l'insertion et du retrait.



La technologie Clixmotion a été intégrée à l'autopiqueur Accu-Chek FastClix. Cette technologie avec mouvement guidé de la lancette, conjointement avec la lancette à facettes spéciales, vous permet de vous piquer tout en douceur et contribue à réduire le risque de dommages cutanés et de lésions des terminaisons nerveuses.



**Support de lancette**  
durant le mouvement de piqûre


**Lancette à 3 facettes**

**Mouvement de lancette guidé dans la cartouche**  
pour une vibration minimisée

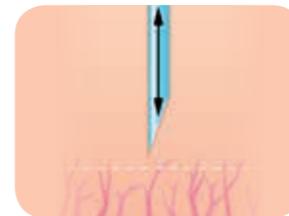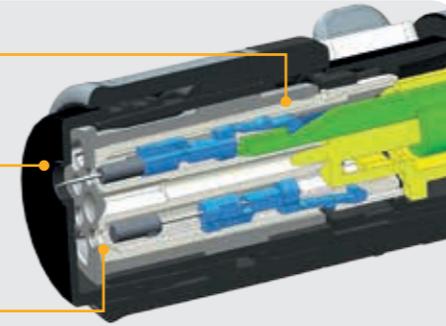

### Avec Clixmotion

- Vibration minimisée – aussi bien lors de l'insertion que du retrait
- La lancette est insérée jusqu'à un arrêt précis et retirée immédiatement

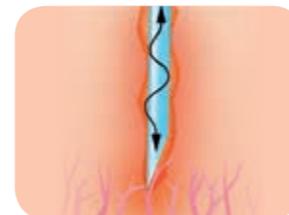

### Sans Clixmotion

- La vibration entraîne une lésion tissulaire douloureuse
- La lancette s'arrête brusquement et se retire

## Une manipulation facile

### Prélèvement d'un échantillon sanguin



Se laver les mains  
Sélectionner l'une des  
11 profondeurs de piqûre



Armer et déclencher  
en un seul clic



En manipulant le levier  
vers l'avant et vers  
l'arrière, mettre en place  
une nouvelle lancette

### Insertion d'une cartouche



Retirer l'embout



Insérer la cartouche  
de lancettes



Remettre l'embout



Nouvelle  
cartouche



Cartouche  
usagée

Utilisez les 6 lancettes avant de changer la cartouche. Pour des raisons d'hygiène, celle-ci ne peut pas être réutilisée une fois retirée.