

## Systeme genial. Manipulation facile.

Le systeme de mesure de la glycemie Accu-Chek Mobile sans bandelettes reactivs, mais avec 50 tests sur une bande continue et avec l'autopiqueur Accu-Chek FastClix integre, actionnable en un seul clic, rend le controle de la glycemie plus rapide et plus facile pour les diabétiques traités à l'insuline.

Grâce à l'Accu-Chek Mobile, vous n'avez aucune bandelette ou lancette maculees de sang à manipuler ou à éliminer.

Découvrez la nouvelle maniere de mesurer!



### Cassette-tests

- 50 tests sur une bande continue
- Pas de déchets de bandelettes
- Codage automatique



### Autopiqueur avec cartouche de lancettes

- Obtenez facilement du sang en un seul clic
- Cartouche de 6 lancettes – pas de contact direct avec les lancettes
- Technique «Clixmotion» avec 11 profondeurs de piqûre différentes

## Le systeme genial pour mesurer la glycemie.



- Mesurer en 4 étapes simples. Probablement la maniere la plus simple de faire le test de glycemie
- 50 tests sur une bande continue
- Aucune bandelette à manipuler ou à éliminer
- Autopiqueur integre Accu-Chek FastClix :
  - Armer et déclencher en un seul clic
  - Cartouche de 6 lancettes – pas de contact direct avec les lancettes

### Experience what's possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE et ACCU-CHEK FASTCLIX sont des marques de Roche.  
© 2014 Roche Diagnostics.

[www.accu-chek.ch](http://www.accu-chek.ch)  
Hotline diabète: 0800 803 303

Roche Diagnostics (Suisse) SA  
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®

## Sans bandelettes. Simple. Genial.



ACCU-CHEK®


## 4 étapes faciles pour mesurer la glycémie



1 Ouvrez le capot de protection. L'appareil se met en marche.



2 Obtenez une goutte de sang à l'aide de l'autopiqueur.

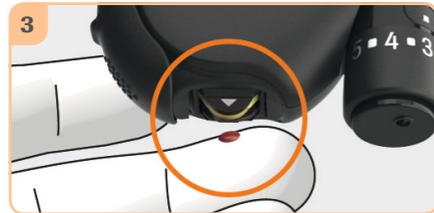

3 Déposez la goutte de sang au centre de la zone réactive.



4 Lisez la mesure et fermez le capot de protection. L'appareil s'éteint.

Seule une exécution correcte de la mesure de la glycémie donne un résultat fiable et permet une recommandation thérapeutique correcte. Veuillez suivre soigneusement les instructions.




Apprenez facilement à utiliser l'Accu-Chek Mobile grâce aux vidéos de formation sur [www.accu-chek.com/howto](http://www.accu-chek.com/howto).



## 4 principes pour mesurer correctement la glycémie




1 **Lavez-vous les mains** à l'eau chaude et au savon et rincez-les soigneusement. Essayez bien vos mains avec un chiffon propre avant de procéder à un prélèvement de sang.

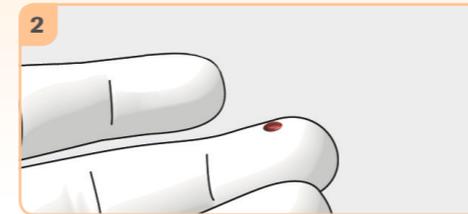

2 Utilisez toujours une petite **goutte de sang frais bien formée**.



3 **Déposez la goutte de sang au centre de la zone réactive**. Effleurez d'un geste précis la zone réactive avec la goutte de sang. **Ne pressez pas** la zone réactive sur votre doigt.

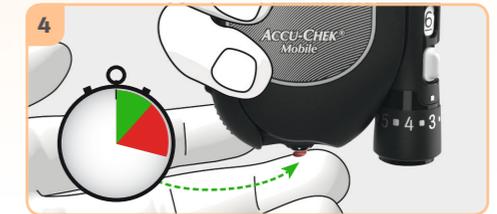

4 **Veillez à appliquer le sang sur la zone réactive immédiatement** après avoir obtenu la goutte de sang. Enlevez votre doigt de la zone réactive dès que le signal sonore retentit (s'il est activé) et que le message *Mesure en cours* s'affiche à l'écran.

## Systeme de mesure: introduire une nouvelle cassette de tests

Après utilisation des 50 tests



1 Ouvrez le capot de protection dans le sens de la flèche jusqu'à la butée.



2 Faites glisser le cran de sécurité dans le sens de la flèche pour que le couvercle du compartiment de la cassette s'ouvre.



3 Retirez la cassette usagée de son compartiment.



4 Insérez la nouvelle cassette de tests. Rabattez le couvercle.

## Autopiqueur: introduire une nouvelle cartouche de lancettes

Après utilisation des 6 lancettes



1 Retirez l'embout et la cartouche de lancettes usagées de l'autopiqueur.



2 Insérez une nouvelle cartouche de lancettes (extrémité blanche en premier). Remplacez l'embout.



3 Tournez l'embout jusqu'à ce que la marque indique la profondeur de piqûre souhaitée. Commencez par une profondeur moyenne, par exemple «3».



4 Préparez l'autopiqueur pour le prochain prélèvement de sang : faites coulisser le levier en direction de ① puis en sens inverse en direction de ②.