


## PROCÉDURE D'UTILISATION

**REMARQUE:** Lire et suivre précisément la procédure d'utilisation; si celle-ci n'est pas suivie, les résultats peuvent être inexacts. Le Test AmniSure ne doit pas être utilisé moins de 6 heures après le retrait de toutes les solutions désinfectantes ou des médicaments du vagin.

Placenta Prævia et un toucher vaginal avant le prélèvement pourraient interférer avec les résultats du test.

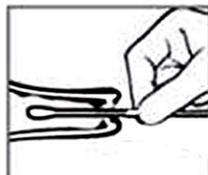

1. Prendre le flacon de tampon au niveau du bouchon et taper légèrement sur une surface plane afin que tout le liquide descende au fond du flacon. Ouvrir le flacon et le maintenir en position verticale.



2. Utiliser l'écouvillon stérile en polyester fourni pour prélever l'échantillon dans le vagin. Sortir l'écouvillon stérile de son emballage en suivant les instructions indiquées sur l'emballage. L'extrémité en polyester ne doit toucher aucune autre surface avant son introduction dans le vagin. Tenir l'écouvillon au milieu de la tige et, pendant que la patiente est allongée sur le dos, introduire avec précaution l'extrémité en polyester de l'écouvillon dans le vagin jusqu'à ce que les doigts viennent en contact avec la peau (pas plus de 5 à 7 cm de profondeur). Retirer l'écouvillon du vagin après 1 minute.



3. Placer l'extrémité de l'écouvillon en polyester dans le flacon fourni dans le kit et rincer l'écouvillon en effectuant des rotations dans la solution tampon pendant 1 minute.

4. Retirer et jeter l'écouvillon.

5. Déchirer le sachet en aluminium au niveau des encoches et sortir la bandelette du Test AmniSure.

6. Plonger l'extrémité blanche de la bandelette (indiquée par des flèches) dans le flacon contenant la solution tampon. En cas d'une fuite importante de liquide amniotique, le résultat sera visible rapidement (en quelques secondes), alors qu'une très petite fuite nécessitera une lecture à 5 minutes.

7. Retirer la bandelette dès que deux lignes sont clairement visibles dans le flacon ou après 5 minutes exactement. Lire le résultat en déposant la bandelette sur une surface plane, propre et sèche. Un résultat positif est indiqué par deux lignes dans la zone test, alors qu'un résultat négatif est indiqué par une seule ligne dans la zone test.

Deux lignes: Présence d'une rupture

Une ligne: Absence de rupture

Aucune ligne: Non valide;  
recommencer le test



Ligne de contrôle | Ligne de test

Ligne de contrôle |

L'intensité des lignes peut varier; le résultat du test est valide même si les lignes sont faibles ou irrégulières. Ne pas interpréter le résultat du test en fonction de l'intensité des bandes. Ne pas lire ou interpréter les résultats plus de 10 minutes après avoir introduit la bandelette dans le flacon.